

**ASINS PARAUGU STABILITĀTE – UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Hematoloģiskie rādītāji	T +20-+25C		T +2-+8C	
	Mikroskopija	Analizators		
Leikocitārā formula			Neglabā	
NEUT		48 stundas		
LYMPH		48 stundas		
MONO		48 stundas		
EO		48 stundas		
BASO		48 stundas		
IG		48 stundas		
NRBC				
Leikocīti		24 stundas	3dienas	
Eritrocīti		24 stundas	3dienas	
Hemoglobīns		24 stundas	3dienas	
Hematokrīts		24 stundas	3dienas	
Trombocīti		48 stundas	3dienas	
Bioķīmiskie rādītāji	Asinis		Plazma vai serums	
	+25C	+2-+8C	+25C	+2-+8C
C-reaktīvaisolbaltums	15 dienas	2 mēn.	15 dienas	2 mēn.
Alanīnaminotransferāze (ALT)	3 diena	8dienas	3diena	8 dienas
Aspartātamīnotransferāze (AST)	4dienas	7dienas	4dienas	7dienas
Afa amilāze	7dienas	7dienas	7dienas	7dienas
Antistreptolizīns O	2 dienas	2 dienas	2 dienas	2 dienas
Kopējais bilirubīns	24 st.	7dienas	24 st.	7dienas
Tiešais bilirubīns	2 dienas	7 dienas	2 dienas	7 dienas
Glikoze	2 st.	2st.	2 st.	2st.
Kopējais olbaltums	24 st.	48 st.	1 nedēļa	34 dienas
Gliko-hemoglobīns	4dienas	7 dienas	4dienas	7 dienas
Dzelzs	2st.	4 st.	7 dienas	3 ned.
Kālijs	1st.	Neglabāt!	1 nedēļa	1 nedēļa
Nātrijs	4 dienas	4 dienas	2 ned.	2 ned.
Kalcijs	2 dienas	2 dienas	7 dienas	3 ned.
Hlorīdi	1 diena	1 diena	7 dienas	7 dienas
Magnijs	24 st.	24 st.	24 st.	7 dienas
Kreatīnkināzes MB masa CK-MB	8 st.	8 st.	8 st.	72 st.
Kreatīnkināze	2 dienas	2 dienas	2 dienas	7 dienas
Kreatinīns	2 dienas	2 dienas	7 dienas	7 dienas
Laktātdehidrogenāze	1 st.	Neglabāt!	7 dienas	4 dienas
Urīnskābe	3 dienas	3 dienas	3 dienas	Neglabāt!
Urīnviela	1 dienas	2 dienas	7 dienas	7 dienas
Reimatoīdais faktors	24 st.	24 st.	1 diena	3 dienas

Ferritīns	24 st.	24 st.	24 st.	7 dienas
Fosfors	24st.	24 st.	24st.	8dienas
Kopējais holesterīns	7dienas	7dienas	7dienas	7dienas
Augsta blīvuma holesterīns	2 dienas	2 dienas	2 dienas	7 dienas
Zema blīvuma holesterīns	2 dienas	2 dienas	2dienas	5dienas
Triglicerīdi	2dienas	7 dienas	2 dienas	7 dienas
Sārmainā fosfatāze	7dienas	7dienas	7dienas	7dienas
Lipāze	7 dienas	7 dienas	7 dienas	7 dienas
Etanols (+2-+4C)	2 nedēļas	2 nedēļas	2 nedēļas	3 mēneši
<b>KOAGULOĢIJA</b>				
Protrombīna komplekss	8 st.	Neglabāt!	8 st.	Neglabāt!
APTL	8 st.	Neglabāt!	8 st.	Neglabāt!
Fibrinogēns	8 st.	Neglabāt!	8 st.	Neglabāt!
<b>HORMONI</b>				
TSH	24 st.	24 st.	24 st.	7 dienas
FT3	24 st.	24st.	24st.	6 dienas
FT4	24 st.	24st.	24st.	6dienas
HCG	24st.	24 st.	24 st.	7dienas
C peptīds	8 st.	48st.	24 st.	48 st.
AugstasjutībasTroponīns I	Neglabāt!	Neglabāt!	8 st.	72st.
Vitamīns D(25OH)	Neglabāt!	12 dienas	Neglabāt!	12 dienas
<b>INFEKCIJAS</b>				
RPR	24 st.	24 st.	24 st.	8 dienas
TPHA	Neglabāt!	Neglabāt!	24 st.	7 dienas
HIV Ag/Ab	Neglabāt!	14 dienas	Neglabāt!	14 dienas
HBsAg	1 diena	6dienas	1 diena	6dienas
Anti HCV	3dienas	14dienas	3dienas	14dienas
EBV a/v IgM	3 dienas	14 dienas	3dienas	14dienas
<b>IMŪNHEMATOĢIJA</b>				
ABO grupas noteikšana	24 st.	7 dienas		7 dienas
Rh anti D antigēns	24 st.	7 dienas		7 dienas
Nepilnās antieritrocītārās antivielas	24 st.	7 dienas		7 dienas
Asins saderināšanas tests	24 st.	7 dienas		7 dienas
<b>AUDZĒJU MARKĪERI</b>				
CEA	24 st.	24st.	24st.	7 dienas
CA 15-3	24 st.	24 st.	24 st.	7dienas
CA 19-9	24 st.	24 st.	24 st.	7dienas
HE4	24 st.	24 st.	24 st.	4dienas
CA 125	24 st.	24 st.	24 st.	7dienas
PSA	24 st.	24 st.	24 st.	7dienas

Datums: 22.11.2020

Sagatavoja: